●スマートフォンの Bluetooth 機能を「ON」にしてください。

●ご使用のスマートフォン本体の機種やソフトのインストール状況によって

アラートが出なかったり、アラートの出るタイミングが違う場合がございます。

●iOS 標準搭載のヘルスケア アプリと連携はしません。

左衛門橋通い



アプリ「 d Da Fit」 をスマートフォンにインストールする



接続アプリ

Da Fit

CS5A0002





プロフィール設定	リトライ ※ 「次」を《 タッチ 》
基本情報を入力してください	プロフィール設定 基本情報を入力してください
性別 男性	性別 男性
生年月日 01 1月, 1999	生年月日 01 1月, 1999
身長 175cm	身長 175cm
体重 65.0kg	体重 65.0kg
步幅 83cm	步幅 83cm
ОК	ОК

許可







リアルタイム
使用中のアプリ、ナビ、着信など
からの継続的な通知

会話 SMSやテキストメッセージなどの コキューケーション 通知へのアクセルを許可を 「ON」にする。



「←」を《タッチ》して []「デバイス] 画面にります。

android の設定はこれで完了です。